

মেডিকেল ইন্সট্রুমেন্ট জীবাণুমুক্তকরণের ধাপসমূহ

প্রথম ধাপ



একটি ঢাকনা-যুক্ত লাল বালতিতে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ তৈরি করুন

দ্বিতীয় ধাপ



ব্যবহারের পরপরই প্রতিটি ইন্সট্রুমেন্ট এই বালতির ০.৫% ক্লোরিন দ্রবনে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে রাখুন

তৃতীয় ধাপ



শেষ ইন্সট্রুমেন্টটি ডুবানোর পর টাইমারে সময় দেখুন বা ঘড়িতে সময় লক্ষ্য করুন

চতুর্থ ধাপ



এই সময়ের থেকে ঠিক ১০ মিনিট পর ইন্সট্রুমেন্টগুলো এক এক করে ক্লোরিন দ্রবণ থেকে সরিয়ে ফেলুন

মনে রাখতে হবে যে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণ তৈরি, ইন্সট্রুমেন্ট ডুবানোর এবং ইন্সট্রুমেন্ট সরানোর সময়ে অবশ্যই হাতে গ্লভস পরে নিতে হবে।